

Instructies voor de patiënt

De volgende informatie moet worden verstrekt aan patiënten bij wie het Barostim-systeem is geïmplanteerd.

POSTOPERATIEVE WONDZORG

- Het wondverband moet op zijn plaats blijven tot nadere instructies van uw arts.
- Zorg er bij het baden voor dat u niet op de wond of het hulpmiddel drukt.
- Raak de operatieplaatsen NIET aan.
- Lig of duw NIET op de IPG (hulpmiddel in de borstkas geïmplanteerd).
- Manipuleer de IPG of de lead (hulpmiddel in de hals geïmplanteerd) NIET door de huid; hierdoor kan het hulpmiddel of het weefsel rondom het hulpmiddel beschadigd raken, of kan ertoe leiden dat de lead loskomt van de IPG.
- Koorts, roodheid, afscheiding of hevige pijn op de operatieplaats na 3 dagen kan een teken van een infectie zijn.
 - Als u een van de bovenstaande symptomen hebt, probeer deze dan NIET thuis te behandelen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.
 - Vroegtijdig bemerkte infecties kunnen doorgaans met antibiotica worden behandeld.
 - Bij ernstigere infecties moeten de IPG en/of lead mogelijk worden verwijderd.

ALGEMENE INFORMATIE

- Zet uw medicatie, dieet, lichaamsbeweging en aangepaste levensstijl volgens de aanwijzingen voort.
- Draag de patiëntidentificatiekaart bij u en laat deze bij beveiligingscontroles zien.
- De IPG-batterij loopt na verloop van tijd leeg en moet dan worden vervangen.
- Follow-upbezoeken aan de arts zijn vereist om te verzekeren dat het systeem naar behoren werkt en dat u op de therapie reageert.
- Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij:
 - stimulatie (tintelingen, spiertrekkingen, spraak- of slikproblemen);
 - duizeligheid, pijn op de borst, ademhalingsproblemen, opzwellen van de benen;
 - ongebruikelijk lage bloeddruk of hartfrequentie.

WAARSCHUWINGEN/VOORZORGSMATREGELEN

- Neem contact op met uw arts als u een medische procedure moet ondergaan:
 - procedures als MRI, diathermie, therapeutische bestraling, lithotripsie en externe defibrillatie kunnen de IPG beschadigen.
- Om te voorkomen dat de therapie tijdelijk stopt, moet u ten minste 15 cm (6 inch) uit de buurt blijven van apparaten met sterke elektrische of magnetische velden, zoals:
 - sterke magneten;
 - luidsprekermagneten;
 - elektronisch artikelbeveiligingssysteem (EAS-systeem) (antidiefstalsystemen);
 - boogglasapparaten;
 - inductieovens.
- Neem contact op met u arts voor advies voordat u een omgeving binnengaat die de werking van de IPG negatief kan beïnvloeden, zoals gebieden waar waarschuwingen zijn aangeplakt om de toegang van patiënten met een pacemaker te verhinderen.
- Manipuleer de IPG NIET door de huid heen – hierdoor kan de lead beschadigd raken of van de pulsgenerator loskomen.
- Manipuleer de sinuscaroticuslead NIET door de huid heen – hierdoor kan de IPG beschadigd raken of kan de lead loskomen van de IPG en/of kan schade aan de sinus caroticus worden toegebracht.



De volledige gebruiksaanwijzing en een actueel exemplaar van de informatie in dit document zijn beschikbaar op: www.cvr.com/ifu